

RECA proct - Einsatzmöglichkeiten

Der **RECA proct** Tampon wird im Enddarm platziert. So werden Operationswunden im Analkanal auf ideale Weise „verbunden“. Vor dem Einsatz wird er in Wasser eingeweicht und dadurch elastisch und anpassungsfähig.

RECA proct ist anwendbar für fast alle proktologischen Operationen im Bereich distales Rectum bis über den anocutanen Übergang hinaus.

Als Beispiel:

- Hämorrhoidenoperation
- Verschiedene Analfisteln
- Fissurektomie
- Analrandplastik
- Marisken



Zur Schmerzstillung und Förderung der Heilung kann **RECA proct** aber auch mit adstringierenden Mitteln oder Anästhetikum versehen werden. Der Tampon kann getränkt werden z.B. mit Betaisodona oder einem Lokalanaesthetikum.

Produktdaten: **Art. Nr. 10/2**

Material: PVA-Schaumstoff - Faden: Baumwolle/Kunststoff - Maße: 24 mm Ø, 70 mm Länge

Anwendungshinweis:

- waschen und desinfizieren Sie sich die Hände und entfernen Sie die Folie
- wickeln Sie den Rückholfaden ab
- weichen Sie **RECA proct** kurz in warmem Wasser ein und drücken Sie den Tampon danach aus



- platzieren Sie den Tampon

RECA proct kann, je nach medizinischer Indikation, bis zu 48 Stunden im Analkanal verbleiben. Entfernt wird er mit dem eingenähten Rückholfaden. Das Herausnehmen wird durch Anfeuchten des Tampons erleichtert.

Zu empfehlen ist ein Sitzbad, das gleichzeitig Beginn der postoperativen Wundpflege ist

Entsorgung: Bitte im Hausmüll entsorgen

Kontraindikation:

- Postoperative Blutungen und Schmerzen

Nebenwirkungen

- Analstenose
Beeinträchtigung des Stuhlgangs möglich
- zeitlich begrenzt
- Evtl. können sich später erneut Hämorrhoiden bilden (Rezidiv)

Warnung:

Wenn während der Verwendung von **RECAproct** plötzlich Fieber, Durchfall, Erbrechen, Schwindelgefühle oder Hautausschlag auftreten, entfernen Sie den Tampon umgehend. Bitte halten Sie sich an die Gebrauchsanweisung. RECA Med übernimmt keine Haftung für entstandene Schäden bei unsachgemäßer Anwendung. Bei Mehrfachanwendung können die hygienischen Bedingungen nicht mehr gegeben sein.



Bitte Gebrauchsanleitung beachten



Einmalgebrauch

10/2 = **CE** 0197

RECA Med übernimmt keine Haftung für entstandene Schäden bei unsachgemäßer Anwendung